



## Instruktion för åtkomst till röntgenbilder från Unilabs via Sectra IDS7/Cx.






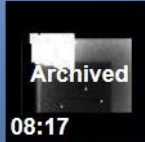
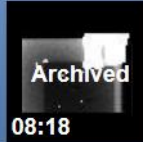
Denna funktion visar Unilabs bilder på enklast möjliga sätt. Efter man har loggat på kommer man till en sökruta där det finns tre val. Använd alltid personnummer (MRN) vid sökning.

Search bar:

Filters: **Name** | MRN | Date of Birth

Labels: Namn | Personnummer | Födelsedatum

Beroende på hur många bilder patienten har kommer det fram en lista över alla undersökningar. Klicka på bilden som ni vill se. Om bilderna är märkta Archived finns de i vårt långtidsarkiv och beroende på storlek på bilderna och vad de är lagrade tar det olika lång tid att öppna bilderna

Tolvansson, Tolvan		M	1912-12-12
Examination Date	Modality	Body Part	
<b>2015-08-19, 08:15</b> <b>MG BREAST</b>			
 08:18			
<b>2015-08-05, 07:56</b> <b>MG BREAST</b>			
 07:57			
 07:58			
 07:58			
<b>2015-07-29, 08:16</b> <b>MG BREAST</b>			
 Archived 08:17			
 Archived 08:17			
 Archived 08:18			

Support vid problem:



Telefon: 010-160 49 00  
öppet alla helfridagar från 07.00-18.00  
E-post: [support@advance.se](mailto:support@advance.se)