

## Bilder.Unilabs.com

### Innehåll


Bilder.Unilabs.com .....	1
Logga in.....	1
Sök patient.....	2
Byte av lösenord.....	2
Användarhandledning UniView.....	3

### Logga in


- Klicka på länken eller skriv in adressen i din webbläsare:

<https://Bilder.unilabs.com>

- Skriv in det användarnamn och lösenord som du har blivit tilldelad

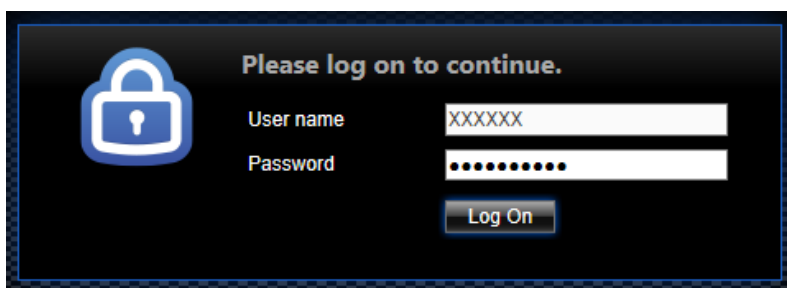


- Skriv in det lösenord (OTP-OneTimePassword) som skickas till din mobiltelefon

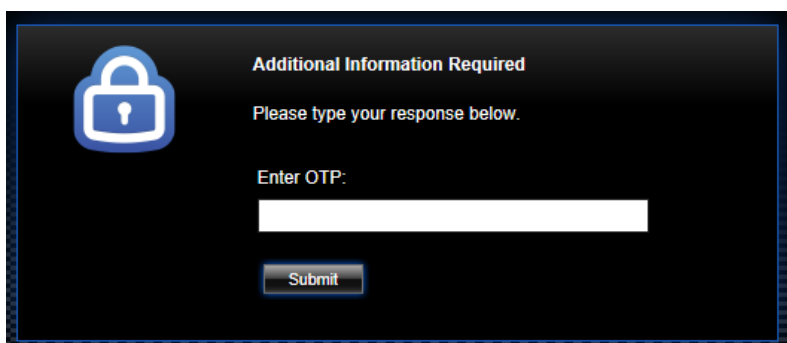

- Logga åter igen in med användarnamn och lösenord för att logga in i bildvisaren



- Du har nu loggats in i bildvisaren

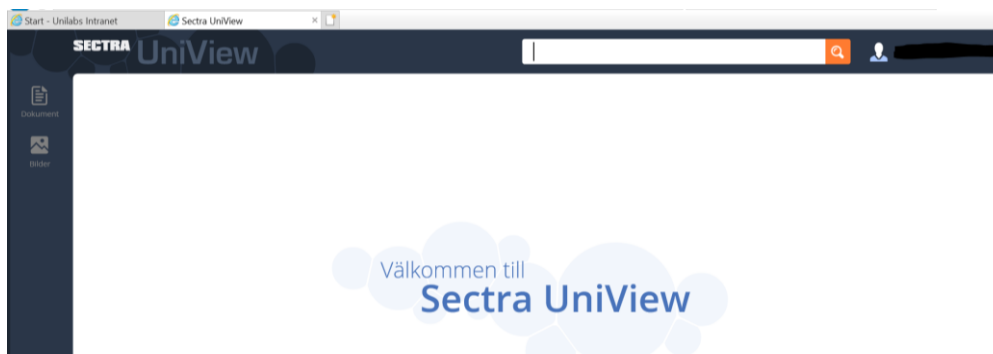

### Sök patient

- Sök efter patient antingen med personnummer eller efternamn

### Byte av lösenord

- Gå in på <https://selfservice.unilabs.com/>
- Klicka på återställ lösenord (SMS)
- Ange ditt användarnamn: t.ex seerilar
- Du får då en kod (OTP) skickad till din mobil
- Ange denna koden klicka på nästa
- Ange ditt önskade lösenord 2 gånger
- Klicka på nästa
- Nu är ditt nya lösenord satt

Om det inte går att byta lösenord eller om ni har andra problem kan ni kontakta:

### Kontakta Visolit support:


- Visolit support
- Tel: 010-160 49 00
- E-post: [support@visolit.se](mailto:support@visolit.se)

## Användarhandledning UniView

- Klicka på figuren bredvid förstoringsglaset



- Klicka därefter på Hjälp

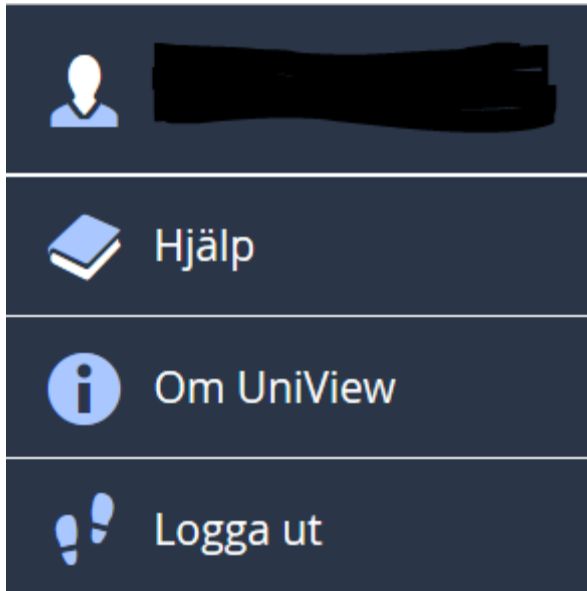

- Du får då upp en användarhandledning för bildvisaren i PDF-format

# Användarhandledning

## Sectra UniView

Sectra PACS, Version 19.1.30, maj 2018

